

Sondă de alcool digitală, detector alcool

Manual de folosire

Etilotest electric pentru conducere în siguranță.

Afișaj LCD cu iluminare de fundal, ceea ce este ușor de citit.

Afișează „ATENȚIE” dacă rezultatul se găsește între 0,02% - 0,05%.

Afișează „PERICOL” când rezultatul atinge sau depășește 0,05%.

Timpe de pornire: 10 sec

Mesajul „OFF” este afișat după 10 secunde de măsurare după finalizare și apoi se oprește automat după aproximativ 3 secunde.



Numărătoare inversă de măsurare: 10 secunde

Domeniu de măsurare: 0,00% - 0,15% sau 0,0 - 1,9g / l

Funcționează cu 2 x baterii AAA. (nu este inclus)

Dimensiuni: 11 cm x 7 cm x 2,5 cm.

1. Apăsați o dată butonul „Power” și sonda digitală va porni.
2. Pe ecran apare „Warm-up” și începe numărătoarea inversă de la 10 - în acele 10 secunde sonda se încălzește.
3. Dacă apare textul „suflă”, aparatul va începe din nou numărătoarea inversă de la 10.
4. Apoi începeți să suflați orificiul de pe partea superioară a sondei timp de aproximativ 5 secunde.
5. Rezultatul măsurătorii poate fi citit de pe afișaj.