

Sondă de alcool suport de cheii Manual de utilizare



Avertizări

- Așteptați cel puțin 15 minute pentru o măsurare precisă cu măsurarea este ultima după consumul de alcool.
- Pentru a păstra acuratețea inițială, se recomandă amplasarea etilotestului la cca. la fiecare 6 luni pentru a calibra.
- Nu suflați fum de tutun în dispozitiv, deoarece acesta poate deteriora senzorul.
- Nu utilizați în afara intervalului de temperatură de la -10 °C până la 50 °C.
- Nu curățați aparatul cu alcool. Utilizați în schimb o cârpă umedă detergenți neutri.

Caracteristici tehnice

- MCU de putere redusă pe 16 biți
- Senzor electrochimic, de înaltă fiabilitate și precizie
- Indicatoare LED bicolore
- Utilizare ușoară
- Oprire automată când bateria este descărcată
- Timp scurt de încălzire
- Afișare rapidă a rezultatelor și timp scurt de așteptare între două măsurători

Porniți dispozitivul

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire.
- Apăsați-l până când LED-urile **roșu** și **galben** se aprind simultan, nu eliberați butonul.
- Pe măsură ce dispozitivul se încălzește, LED-urile roșii și galbene se sting, apoi se aprinde ledul verde. Dispozitivul este apoi gata de utilizare.
- Este important să țineți apăsat butonul de pornire în timpul utilizării.**

Semnificația Ledurilor

Led verde nu există alcool în corp

Led galben indică nivelul alcoolului în sânge sub 0,02%

Led roșu indică nivelul alcoolului în sânge peste 0,05%